
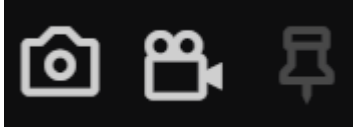





<p>Krok 1 – Zapnutí</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zapneme zařízení tlačítkem na předním panelu - Počkáme až se spustí (cca 1 minuta) - Pokud není nastaveno automatické spuštění, zapnete program ikonou níže  <ul style="list-style-type: none"> - Přihlásíme se do programu dle dodaných přihlašovacích údajů - Po přihlášení se automaticky systém přepne na záložku Digitalizace 	<p>Krok 2 – Zadání pac. Údajů</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zadáme všechny potřebné patientské údaje nebo vybereme pacienta z Worklistu - Při zadání prvních 6 číslic z rodného čísla systém automaticky napovídá pacienty z PACS a po kliku na napovězeného pacienta se veškeré zbylé údaje vyplní - Jakmile je pacient zadán, systém automaticky tyto data uloží 	<p>Krok 3 – vytvoření záznamu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Snímky a videa tvoříme tlačítky v dolní části v oblasti náhledu (viz ikony níže).  <ul style="list-style-type: none"> - Další možností je vytvořit snímky a videa USB pedálem případně ovládáním z kamerové hlavy - Snímky a videa se postupně přidávají do pracovní sady vpravo od náhledu - Při natáčení videa je možné přidat značku za pomoci ikony „špendlíku“
<p>Volitelný krok 4 - Kategorizace</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pokud jsme na záložce „Úprava záznamu“ je možné po označení snímků nebo videí kategorizovat za pomoci štítků. - Po označení snímků nebo videa se zobrazí v dolní oblasti pracovní sady tato ikona:  <ul style="list-style-type: none"> - Po kliku na ikonu ve vyhledávacím formuláři přidáme požadované štítky a uložíme 	<p>Krok 5 - Uložení</p> <ul style="list-style-type: none"> - Před ukončením je důležité vše „ULOŽIT“ tlačítkem níže!!!!!!  <ul style="list-style-type: none"> - Pokud nejsou data důležitá k uložení je možné vše smazat tlačítkem vedle 	<p>Krok 6 - Vypnutí</p> <ul style="list-style-type: none"> - Přejdeme na záložku „Ovládání“: - Vybereme možnost vypnutí  <p>Červená ikona - Okamžité vypnutí PC Ikona s hodinami - AUTOVypnutí až po uložení a odeslání všech dat Ikona šipek - Restart zařízení</p>

Možnost výběru pacienta:

- Manuální zadání
- Worklist

Přepnutí mezi zdroji videa a úpravou vytvořených snímků / videí

Tlačítko pro přepnutí:

- Dicomizace dat (jpeg, pdf, mp4)
- Úpravu záznamů (střih, ořez)
- Ovládání (Vypnutí, Stream)
- Fronta (odesílajících se dat do PACS)

Záložky přepnutí mezi:

- Pracovní sadou (aktuální záznamy z vyšetření)
- Nezpracovanými záznamy (snímky a videa, které nebyly v minulých vyšetřeních přiřazeny k pacientovy a řádně uloženy nebo smazány)

Tlačítka pro:

- Uložení vytvořených záznamů
- Smazání aktuálních záznamů

Náhled s tlačítky pro ovládání:

- Vytvořit snímek
- Start/stop video
- Přidání značky do videa

Možnost zobrazení/schování postranních panelů

Tlačítka pro správu v pracovní sadě:

- Kategorizace snímků/videí
- Přesun vybraných snímků mezi pracovní sadou a nezpracovanými záznamy
- Smazání označených snímků