



Rozšířená funkce č. 1 – TIMESHIFT

- V případě zapnuté funkce je v náhledu vedle ikony nahrávání videa uvedena ikona navíc , která umožňuje zpětného nahrávání v čase. Po zapnutí nahrávání se ikona aktivuje a po kliku se zobrazí dialog pro možnosti:
- Vracení v čase o uvedenou hodnotu (60,30,15 a nebo 5 minut)
- posuvník ve kterém je možné se vrátit o libovolnou hodnotu zpět v čase

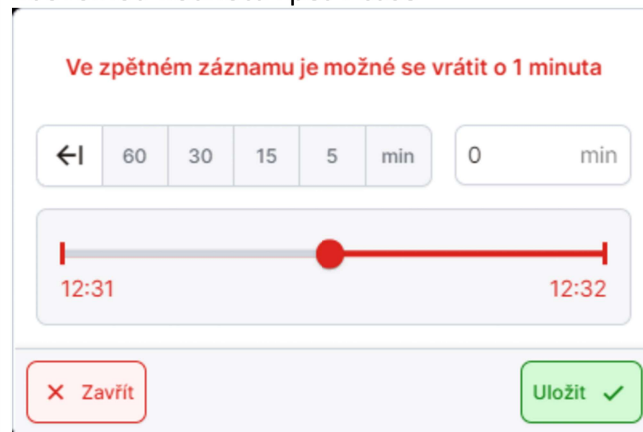

Pokud vybereme jakýkoliv úsek vrácení tak se požadovaný čas přičte k aktuálnímu záznamu nahrávání. Viz záznam čase v levém horním rohu náhledu.

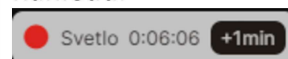

Funkce je jakkoliv zpětně kompatibilní a je možné se vracet zpět v čase opakovaně, ale vždy jen o tu dobu co bylo zařízení zapnuto a spustilo se nahrávání na pozadí.

Rozšířená funkce č. 2 – Nezpracované záznamy

- Možnost zpětného uložení pořízených fotografií a videí, které je možné vyvolat přechodem na záložku „Nezpracované záznamy“ v pravé části obrazovky. Přechod na záložku je z „pracovní sady“ kde jsou zobrazeny



aktuální pořízená data (foto a video).

- Pro možnost zpětného uložení záznamu je nutné označit požadované záznamy převzet je zpět do pracovní sady ikonou ve spodní části záložky  Vybrané

- Nyní je potřeba vyplnit patientské údaje a uložit dle standardního postupu digitalizace. Viz manuál „digitalizace“.

- Záznamy je možné přesouvat z pracovní sady i do nezpracovaných záznamů v případě, že je potřeba se snímky pracovat později

- Čas který přesouvá pořízené záznamy do „Nezpracovaných“ je defaultně nastaven na 15 minut od posledního používání digitalizace

Rozšířené funkce č. 3 – Práce se snímky

1) Otočení a ořez snímku

V případě vybrání snímku je možné snímek otočit či



oříznout. K tomu slouží ikony , které jsou umístěny nad náhledem snímku.


V případě jakýchkoliv úprav systém upozorní uživatele

„malou disketou“  na nový stav snímku a v případě odeslání do PACS uloží v požadovaném stavu.

Ikona diskety pouze zeleně problikne.

2) Střih videa a přidání značky

Ikony pro práci s videem jsou umístěny ve spodní části pod náhledem videa a jsou to:

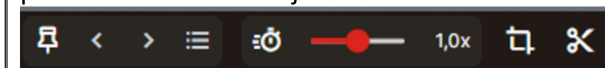

- Přidání značky do videa (Značku je možné přidat i po stisknutí klávesy CTRL a kliku myši na požadované místo na časové ose videa)
- Rychlý přesun mezi značkami
- dialogové okno pro popsání značek ve videu
- Rychlost přehrávaného videa (0,1x – 4,0x)
- Ořez videa
- Střih videa

Střih videa:

- Po stisknutí tlačítka střihu videa se zobrazí pod ikonami nová lišta pro výběr části videa.



- V této liště je možné zadat úseky videa, která se mají uložit. Úseků je možné udělat libovolný počet a je možné je čas úseku dodatečně upravovat také.
- Při podržení klávesy Ctrl + kliknutí levým tlačítkem na výřez jej lze smazat